




## Image 3

Yleiskäyttöinen sairaalasänky matalalla korkeudella

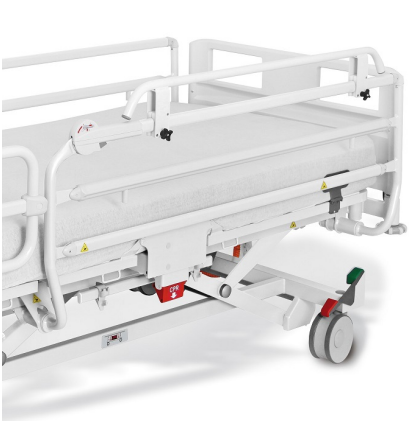

# Monipuolisesti ominaisuuksia

Image 3 | Sängyssä on runsaasti ominaisuuksia kuten tehokas tuoliasento, viides pyörä ja matala korkeus. Lisäksi Image 3:en on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita, joten sänky voidaan muokata jokaisen osaston yksilöllisiin tarpeisiin.

## MATALIN KORKEUS 28cm

Image 3:n patja-alusta voidaan säätää jopa 28cm korkeuteen lattiasta näin vähentäen merkittävästi sängystä putoamisen riskiä etenkin yöllä.

- Matala korkeus suojaa potilasta loukkaantumisilta
- Image 3 luo turvallisen ympäristön potilaille, joilla on korkea putoamisen riski.
- 28cm korkeus mahdollinen 12,5cm pyörillä.

## PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN

Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa potilaan lantion alueelle selkänojaa ja/tai reisitukea käytettäessä, jolloin vältetään potilaan puristuminen patja-alustan osien väliin. Tämä uniikki rakenne vähentää myös kitkavoimia patja-alustan myötäillessä kehon osien liikettä. Image 3 soveltuu myös käytettäväksi aktiivipatjojen kanssa riittävän korkeiden sivulaitojensa ansiosta.



## SÄNGYN KULJETTAMINEN

- Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla
- Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivulla, mikä estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää sängyn kääntökulmaa
- Sängynpäätyihin on muotoiltu kätevät kahvat tukevan otteen saamiseksi
- Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain liikuttelun mahdollistamiseksi
- Image 3 on varustettu akulla, jolloin sänkyä voidaan käyttää verkkovirrasta irrotettuna myös kuljetuksen aikana

## TEHOKAS TUOLIASENTO

Cardiac Chair -asento yhdistää korkean Fowler-asennon ja paineen lievennyksen vatsan alueella. Näin mahdollistetaan hengityksen helpottaminen sekä ylimääräisten hengitysilhasten käyttö.

- Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä painamalla
- Sänky nostaa samanaikaisesti selkänöjan, reisituen sekä tekee anti-Trendelenburg asennon
- Selkänöja saadaan erittäin pystyyn asentoon
- Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa lantion alueelle ehkäisten puristus- ja kitkavoimia



## TUKEVA RAKENNE

- Sängyn runko on tehty vakaaksi ja tukevaksi
- Matalin asento patja-alusta 28cm lattiasta
- Valinnaiset tuplapyörät tekevät sängystä entistä tukevamman liikuttaa

## PATJA-ALUSTAN PIDENNYS


- Patja-alustan jalkopäädssä integroitu pidennys
- Pidennys jopa 32cm (200cm + 32cm)
- Kolmiportainen pidennys

## 90cm LEVEÄ PATJA-ALUSTA

- Patja alustan leveys 90cm ja turvallinen työkuorma 250kg
- Leveä patja-alusta luo mukavuutta potilaalle
- Patja-alusta helposti puhdistettavissa irroitettavien palasten ansiosta

## ERGOFRAME-RAKENTEEN VAIKUTUKSET

- Vähentää painetta lantion ja ristiselän alueella sänkyä säädettäessä
- Ylläpitää hapensaantia keuhkoihin
- Vähentää painehaavojen riskiä lantion ja lapaluiden alueella
- Tekee sängystä mukavan potilaalle kaikissa asennoissa, mukaan lukien istuma-asento
- Ehkäisee vatsaontelon sisäelimiin kohdistuvasta paineesta johtuvia komplikaatioita
- Takaa päälle jatkuvan tuen

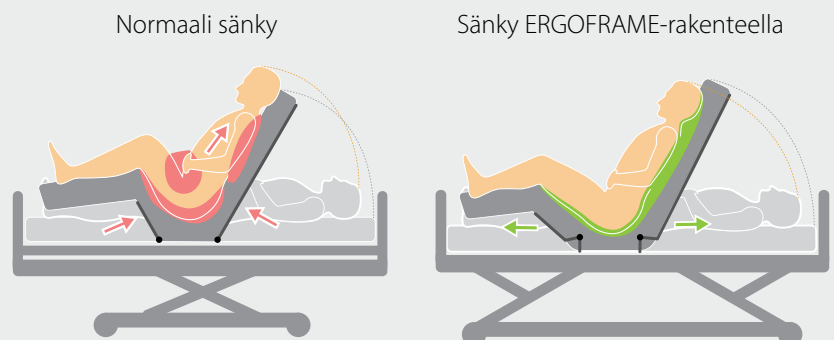

Korkean paineen ja kitkavoimien alueet

# Image 3

Yleiskäyttöinen sairaalasänky matalalla korkeudella



**Jakelija:**

Conimex Oy  
Kuortaneenkatu 2  
00510 Helsinki  
[www.conimex.fi](http://www.conimex.fi)  
[info@conimex.fi](mailto:info@conimex.fi)