

Image 3 W



Konepestävä sairaalasänky



Kaksi erilaista mallia

Image 3 W -sairaalasängystä on saatavilla kaksi ulkonäöltään erilaista mallia - design- ja sairaalamalli. Käyttöominaisuuksiltaan nämä mallit ovat samanlaisia .

Designmalli



Sairaalamalli



Koneellisesti puhdistettavissa

Image 3 W on suunniteltu pestäväksi automaattisissa sänkypesukoneissa. Sänky on testattu muunmuassa Mielen, Dirschlin, MMM:n, Kleindienstin ja Belimedin laitoksissa.



Parhaat olosuhteet tehokkaille prosesseille

- Korroosionkestävät materiaalit, elektroniikka suojattu käytettäväksi **IPX6** pesutunneleissa
- Edistyksellinen runkorakenne, jossa valutusreiät sijoitettu ideaalisti
- Patja-alustan osien irrotus mahdollista parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi
- Sopiva koneelliseen pesuun AK-BWA:n mukaan
- Sileät ja laajat alueet varmistavat nopean valutuksen ilman veden kerääntymistä
- Valmiiksi ohjelmoitu asento pesua varten voidaan asettaa yhtä näppäintä painamalla.

**Sopiva koneelliseen pesuun
AK-BWA:n mukaan**



Working group for
decontamination systems of
bed frames



Monipuolisesti ominaisuuksia

Image 3 | Sängyssä on runsaasti ominaisuuksia kuten tehokas tuoliasento, viides pyörä ja matala korkeus. Lisäksi Image 3:en on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita, joten sänky voidaan muokata jokaisen osaston yksilöllisiin tarpeisiin.

MATALIN KORKEUS 28cm

Image 3:n patja-alusta voidaan säätää jopa 28cm korkeuteen lattiasta näin vähentäen merkittävästi sängystä putoamisen riskiä etenkin yöllä.

- Matala korkeus suojaa potilasta loukkaantumisilta
- Image 3 luo turvallisen ympäristön potilaille, joilla on korkea putoamisen riski.
- 28cm korkeus mahdollinen 12,5cm pyörillä.

PÄINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN

Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa potilaan lantion alueelle selkänöjää ja/tai reisitukea käytettäessä, jolloin vältetään potilaan puristuminen patja-alustan osien väliin. Tämä uniikki rakenne vähentää myös kitkavoimia patja-alustan myötäillessä kehon osien liikettä. Image 3 soveltuu myös käytettäväksi aktiivipatjojen kanssa riittävän korkeiden sivulaitojensa ansiosta.



TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat	99,8x220cm (sairaala) / 104x221cm (design)
Patjan mitat	200x86/90cm
Alarungon korkeus	13/15.5cm
Patja-alustan korkeudensäätö	28–80/30–82cm
Sängyn pidennys	10, 22, 30,5cm
Sivulaitojen korkeus	39cm
Patjan maksimikorkeus	17cm (sairaala) / 18cm (design)
Turvallinen työkuorma	250 kg
Sängyn paino	140 kg riippuen lisävarusteista
Selkänöjan kulma	0–70°
Reisituen kulma	0–34°
TR/Anti-TR kulma	0–14°


SÄNGYN KULJETTAMINEN

- Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla
- Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivuilla, mikä estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää sängyn kääntökulmaa
- Sängynpäättyihin on muotoiltu kätevät kahvat tukevan otteen saamiseksi
- Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain liikkumisen mahdollistamiseksi
- Image 3 on varustettu akulla, jolloin sänkyä voidaan käyttää verkkovirrasta irrotettuna myös kuljetuksen aikana

TEHOKAS TUOLIASENTO

Cardiac Chair -asento yhdistää korkean Fowler-asennon ja paineen lievennyksen vatsan alueella. Näin mahdollistetaan hengityksen helpottaminen sekä ylimääräisten hengityslihasten käyttö.

- Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä painamalla
- Sänky nostaa samanaikaisesti selkänöjan, reisituen sekä tekee anti-Trendelenburg asennon
- Selkänöja saadaan erittäin pystyyn asentoon
- Patja-alustan ErgoFrame-rakenne luo lisätilaa lantion alueelle ehkäisten puristus- ja kitkavoimia

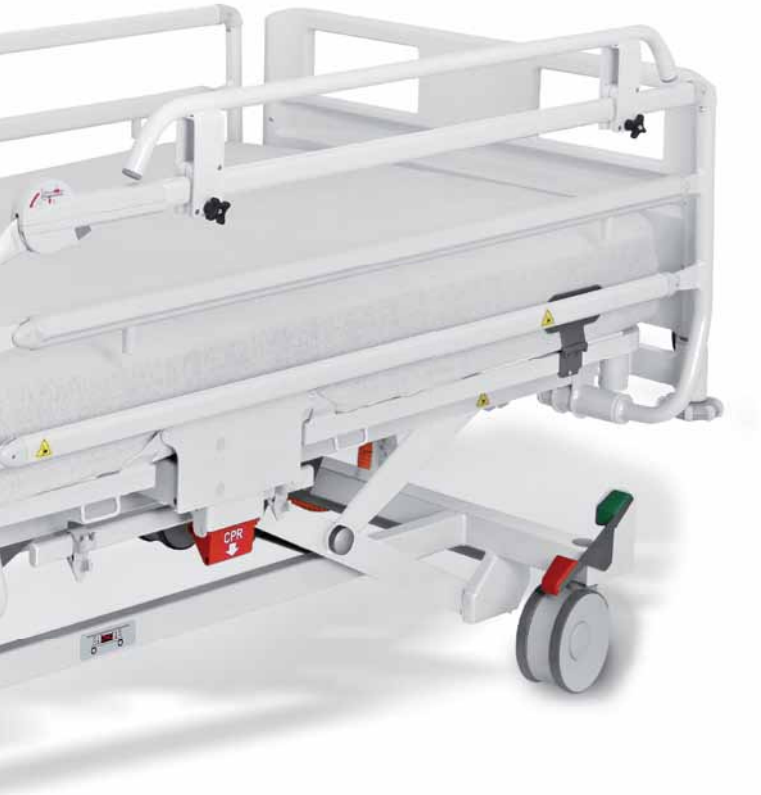

TUKEVA RAKENNE

- Sängyn runko on tehty vakaaksi ja tukevaksi
- Matalin asento: patja-alusta 28cm lattiasta
- Valinnaiset tuplapyörät tekevät sängystä entistä tukevamman liikuttaa

PATJA-ALUSTAN PIDENNYS


- Patja-alustan jalkopäädyssä integroitu pidennys
- Pidennys jopa 30,5cm (200cm + 30,5cm)
- Kolmiportainen pidennys

90cm LEVEÄ PATJA-ALUSTA

- Patja alustan leveys 90cm ja turvallinen työkuorma 250kg
- Leveä patja-alusta luo mukavuutta potilaalle
- Patja-alusta helposti puhdistettavissa irroitettavien palasten ansiosta

ERGOFRAME-RAKENTEEN VAIKUTUKSET

- Vähentää painetta lantion ja ristiselän alueella sänkyä säädettäessä
- Ylläpitää hapensaantia keuhkoihin
- Vähentää painehaavojen riskiä lantion ja lapaluiden alueella
- Tekee sängystä mukavan potilaalle kaikissa asennoissa, mukaan lukien istuma-asento
- Ehkäisee vatsaontelon sisäelimiin kohdistuvasta paineesta johtuvia komplikaatioita
- Takaa päälle jatkuvan tuen

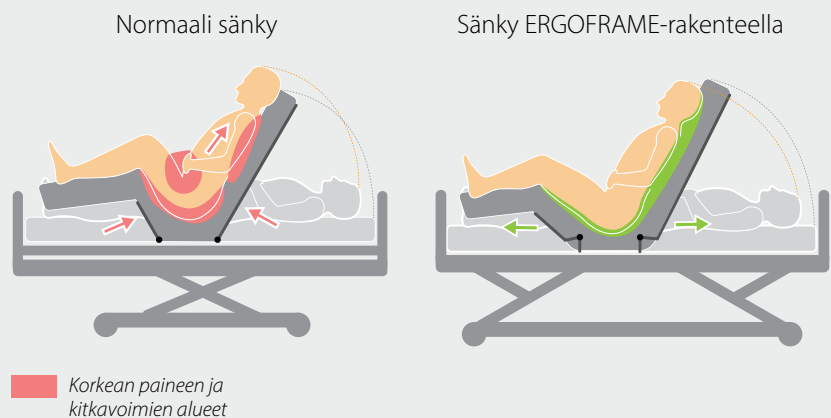


Viides pyörä: yllättävän helppoa kuljettamista



Viides pyörä sijaitsee keskellä sänkyä. Pyörä tekee sängyn kuljettamisesta helpompaa kapeilla käytävillä, pienissä huoneissa sekä käännettäessä sänkyä paikallaan. Sängyn liike pysyy suorassa pitkillä käytävillä ja ohjaaminen esimerkiksi hissiin on helpompaa.


Potilashuoneissa

- Helppo kääntäminen paikallaan

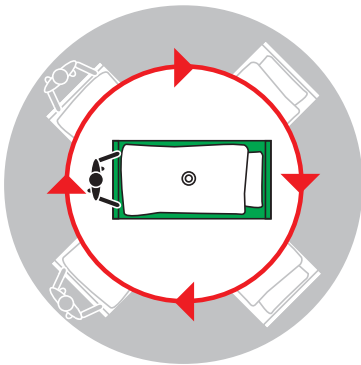


Käytävillä

- Pienempi kääntökulma

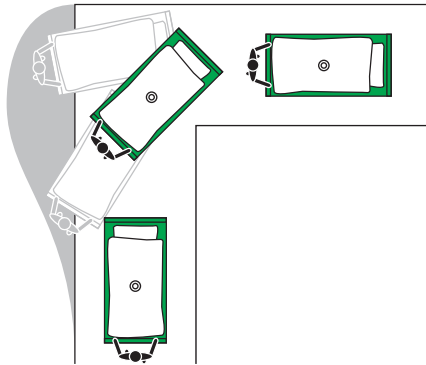

Muita kuljetuksen ominaisuuksia

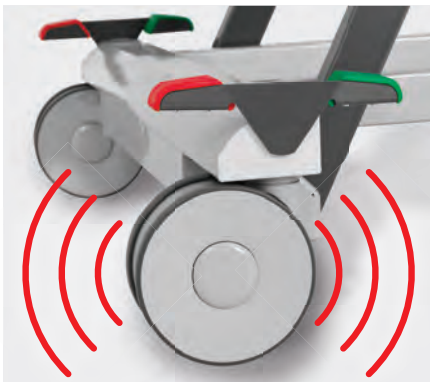

- Pyörien keskuslukitus (vakio)
- Tuplapyörät (valinnainen)
- Jarruhälytin (valinnainen)

Stylo 3 W

Stylo 3 W on koneellisesti pestävä potilaspöytä. Mikäli haluat varustaa osastosi kokonaan konepestävillä kalusteilla, on Stylo 3 W -potilaspöytä täydellinen kumppani Image 3 W -sairaalasängylle. Pöytä on sopiva koneelliseen pesuun AK-BWA:n mukaan. Pöydässä yhdistyvät miellyttävä muotoilu sekä monipuoliset ominaisuudet.




Ruokailutasoa voidaan kääntää 25° sivulle, jolloin se voidaan asettaa potilaan kannalta optimaaliseen asentoon.




Ruokailutason käsisyyden helppo vaihdettavuus mahdollistaa pöydän muokkaamisen potilaan yksilöllisiä tarpeita silmällä pitäen.



Kompakti rakenne ja viides pyörä tekevät potilaspöydästä erityisen tukevan ja helpon liikuttaa.

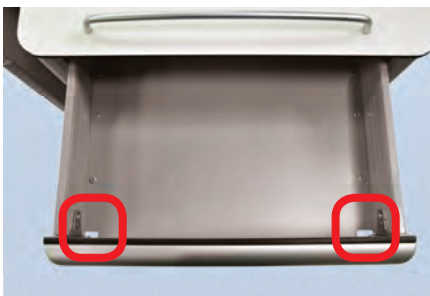

Optimaalisesti sijoitetut valutusreiät varmistavat nopean kuivumisen sekä estävät veden kerääntymisen laatikoihin.

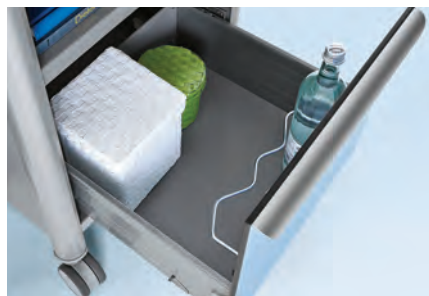

Tilavat laatikot tekevät tavaroiden säilyttämisestä helppoa.



Laatikot voidaan myös varustaa käyttömukavuutta liukuominaisuudella (valinnainen).

Image 3 W

Konepestävä sairaalasänky

Jakelija: Conimex Oy

Kuortaneenkatu 2

00510 Helsinki

www.conimex.fi

info@conimex.fi

+358 40 7400936

